

COV

SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST

SCHELLER UND SICHERER TEST ZUM NACHWEIS VON SARS-CoV-2-ANTIGENEN

- Einfach und sicher in der Anwendung
- Qualitativer Nachweis von SARS-CoV-2 Antigenen
- Abstrich durch den Nasen-Rachenbereich
- Genauigkeit: 99,3%
- Konkretes Ergebnis nach 15 Minuten
- Für Besucher/Beschäftigte in Gewerbe, Industrie und öffentlichen Einrichtungen
- CE-zertifiziert
- BfArM/PZN-registriert (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)
- Verpackungsinhalt:
 - 5 Testkassetten
 - 5 Nasenabstrichstäbchen
 - 5 Extraktionspufferröhrchen
 - 1 Packungsbeilage



ALLGEMEINE INFORMATION

Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest bietet einen schnellen und präzisen Nachweis einer akuten Infektion durch SARS-CoV-2 mit einer Genauigkeit von 99,3 %. Der Abstrich wird über die Nasenhöhle entnommen. Nach 15 Minuten kann das Ergebnis auf der Testkassette abgelesen werden.

Für Besucher/Beschäftigte in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Einrichtungen, Ämtern und Behörden. Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist CE-zertifiziert und BfArM/PZN-gelistet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

TECHNISCHE INFORMATION

Relative Genauigkeit: 99,3% (97,5% - 99,9%)*
Relative Sensitivität: 97,1% (83,8% - 99,9%)*
Relative Spezifität: 99,6% (97,7% - 99,9%)*
*95% Konfidenzintervalle

Inhalt: 5 Testkassetten, 5 Nasenabstrichstäbchen, 5 Extraktionspufferröhrchen, 1 Packungsbeilage
Probematerial: Nasopharynx (Nasen-Rachenraum)
Dauer: 15 Minuten
Haltbarkeitsdatum: 2022-12-07
PZN: 17194468


ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest sollte unmittelbar nach der Probenentnahme (innerhalb 1 Stunde) durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Materialien bei Raumtemperatur und beschriften Sie ggf. die Extraktionspufferröhrchen um eine Verwechslung auszuschließen.
- So verwenden Sie den Schnelltest:
 1. Führen Sie vorsichtig das Nasenabstrichstäbchen in den Nasen-Rachenraum ein und entnehmen Sie den Abstrich.
 2. Drehen Sie das Stäbchen min. 5x gegen die Schleimhaut der Nasenhöhle, um eine ausreichende Probenentnahme zu gewährleisten.
 3. Entfernen Sie die Kappe vom dem Extraktionspufferröhrchen und geben Sie das Stäbchen hinein.
 4. Drehen Sie dieses mindestens 15 Sekunden lang und rollen sie den Tupferkopf ca. 5x gegen die Wand des Extraktionsröhrchens.
 5. Entfernen Sie das Nasenabstrichstäbchen, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Tupferkopf abzustreifen.
- 6. Befestigen Sie die Tropfspitze fest am Extraktionspufferrohr und vermischen Sie den Inhalt gründlich.
- 7. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel und legen Sie diese auf eine flache, saubere Oberfläche.
- 8. Drehen Sie das Extraktionspufferröhrchen mit der Tropfspitze nach unten und halten Sie es vertikal ca. 2,5 cm über die Testkassettenvertiefung. Drücken Sie das Röhrchen vorsichtig zusammen und geben Sie 3-5 Tropfen der verarbeiteten Probe in die Probekammer.
- 9. Nach 15 Minuten werden die Kontrollstreifen sichtbar. Ein späteres Ablesen wird nicht empfohlen!
- Der Test ist nur gültig, wenn im Kontrollbereich C eine farbige Linie erscheint.
- Wird eine farbige Linie im Testlinienbereich T sichtbar, ist der Test positiv. Dies ist ein Hinweis auf eine aktive Infektion. Eine medizinische PCR-Labortestung wird dringend empfohlen.
- Ist keine Linie im Testlinienbereich T sichtbar, ist der Test negativ. Negative Ergebnisse schließen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollten nicht die einzige Grundlage für Behandlungsmaßnahmen sein.
- Bitte beachten Sie die Packungsbeilage.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
Y601010	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	5 St./Pack	SICHERHEIT UND SCHUTZ

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

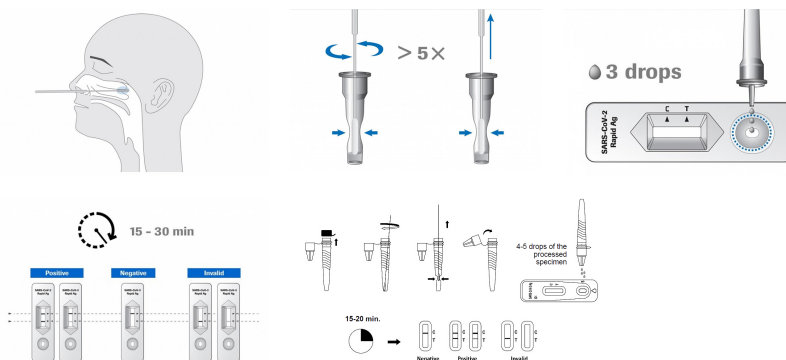

SICHERHEIT UND SCHUTZ

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

