

RTA

BLUTSTILLENDER, ANTISEPTISCHER UND SELBSTKLEBENDER VERBAND

- Reine Baumwolle, stark und elastisch
- Klebt nicht auf der Haut oder auf der Wunde
- Einfache und schnelle Anwendung
- Keine Schere erforderlich
- Ideal für die Baustelle und den Verbandskasten
- Hände können feucht oder schmutzig sein
- Mit desinfektions- und blutstillenden Mitteln getränkt
- Formbeständig bei Nässe, Öl, Fette und Staub
- Enthält keine Allergene
- Auch für empfindliche Haut geeignet
- Als Kompressen verwendbar



RESCUE TAPE

ALLGEMEINE INFORMATION

RESCUE TAPE ist ein selbstklebender, antiseptischer, blutstillender Wundverband für eine schnelle und einfache Anwendung, ohne Schere. RESCUE TAPE kann direkt auf feuchter und verschmutzter Haut angewendet werden und bleibt formbeständig bei Nässe, Öl, Fett und Staub.

RESCUE TAPE klebt weder auf der Haut noch auf der Wunde und kann als Kompressen verwendet werden. Ideal für die Baustelle und den Verbandskasten. RESCUE TAPE enthält keine Allergene und ist für empfindliche Haut geeignet.

TECHNISCHE INFORMATION


Material: Baumwolle
Farbe: blau

Maße: 4cm x 2m
Haltbarkeit: 5 Jahre
Kühl und trocken lagern

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- Reißen Sie ca. 25cm der Bandage ab.
- Entfernen Sie das Schutzpapier.
- Wickeln Sie die Bandage überlappend über die verletzte Stelle und drücken diese vorsichtig fest.
- Bei Verwendung an der Fingerkuppe kann die überstehende Bandage zusammengedrückt und fixiert werden um einen lückenlosen Abschluss zu gewährleisten.
- Kann als Kompressen verwendet werden, indem der Verband einige Male gefaltet wird.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T151100	Rescue Tape 2m	2m	siehe Aufdruck + 60 Monate	SICHERHEIT UND SCHUTZ
T151200	Rescue Tape Rubber 1m	1m	siehe Aufdruck + 60 Monate	SICHERHEIT UND SCHUTZ

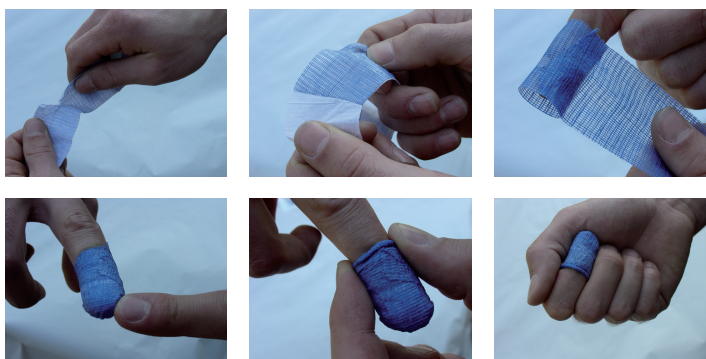

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

