

## PAT

### ÖNTAPADÓ, VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ KÖTÉS

- Használatához nincs szükség ollóra
- Tiszta pamut, erős és rugalmas
- Nem ragad a sebbe vagy a bőrre
- A kéz nedves vagy piszkos is lehet
- Fertőtlenítő és vérzéscsillapító anyaggal átitatott termék
- Ellenáll a víznek, zsírnak, olajnak és homoknak



## NOVAPATCH

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVAPATCH öntapadó kötszer, amely száraz, nedves, sőt szennyezett kézen is használható.

A NOVAPATCH impregnált alapanyaga fertőtlenítő és vérzéscsillapító hatású.

### TECHNIKAI ADATOK


Minőségét megőrzi: 24 hónapig  
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Tépjén le egy megfelelő méretű darabot (10-15 cm).
- Kissé feszesen tekerje fel a kívánt testrészre a fényes oldalával befelé.
- A két végén tekerje vissza.
- A kötés felhelyezése után azonnal folytathatja a munkát.
- Nagy felületű sérülések ellátásakor javasoljuk nyomókötszésként való használatát. A letépett darabot félbe hajtva tegye a sebre és azt a megfelelő módon szorosan rögzítse kötszer és ragasztóanyag felhasználásával.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés                | Anyagtípus            |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| N150100  | Novapatch   | 200 cm x 5 cm<br>tekerces | EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG |

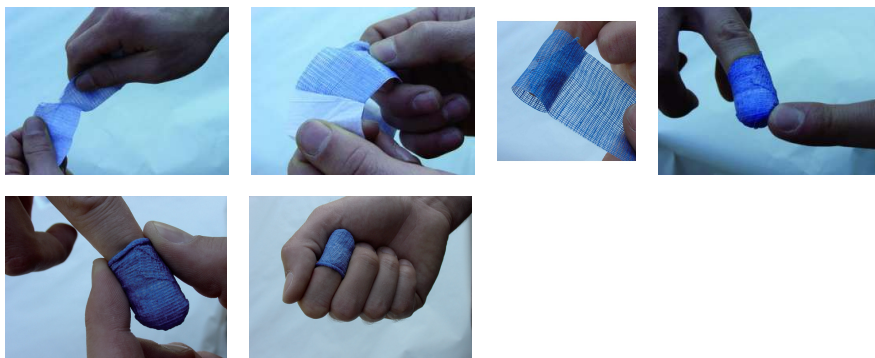

### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

